

REINIGUNGSMITTELEMPFEHLUNG

Lagerungshilfen Pearltec

Dieses Dokument zeigt eine Auswahl an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, welche sich zum Reinigen und Desinfizieren der Polyurethan Folie der folgenden Pearltec Produktgruppen eignet.

- MULTIPAD
- CT HeadFix
- CRANIA
- BabyFix Cocoon
- PearlFit
- PearlFit Vac
- ProFoam
- CT Table Cover
- ProBelt

Empfohlene Reinigungs- und Desinfektionsmittel:

Zur Reinigung und Desinfektion von Pearltec Produkte eignen sich die im medizinischen Umfeld gebräuchlichen Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion, wie z.B.:

Alkohol

- Incidin liquid (Ecolab)
- Mikrozyd AF liquid (Schülke)
- 70 % Alkohol (Hänseler)
- 2-Propanol (Sigma Aldrich)

Alkoholfrei

- Mikrozyd sensitive liquid (Schülke)

Aldehydfrei

- Biguanid Fläche N (Schumacher / Dengg)
- TPH protect (Schülke)
- Kohrsolin FF (Hartmann)

Sauerstoffabspalter

- Perform (Schülke)

Reinigungs- und Pflegehinweis:

- A) Verwenden Sie für jede Anwendung eine Hygienebarriere zwischen Patient und Pearltec Produkt, um die Oberfläche zusätzlich zu schützen.
- B) Pearltec Produkt nach jeder Anwendung mit freigegebenen Desinfektionsmitteln zur Oberflächendesinfektion reinigen.
- C) Gesamte Produktoberfläche nur mittels Wischdesinfektion, beispielsweise mit vorgefertigten Desinfektionstüchern gründlich reinigen. Reinigungsmittel nicht direkt auf Produkt sprühen/geben. Produkte nicht sterilisieren.
- D) ProFoam und ProBelt Produkte (nicht ProBelt Thorax) alternativ auch in Reinigungsbad eintauchen.

